

## Calprotectin im Stuhl: Anweisungen für Probenvorbereitung

## Calprotectina nelle feci: Istruzioni per la preparazione del campione

Componenti del CALEX® Cap

Fig. A  
CALEX® Cap alla consegna


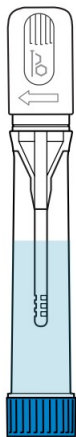


Fig. B  
Tappo di campionamento



Fig. C  
Corpo CALEX® Cap

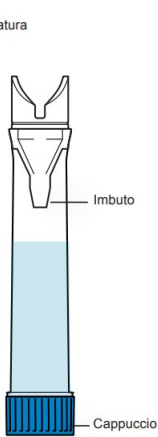

Bestandteile von CALEX® Cap

Abb. A  
CALEX® Cap bei Lieferung

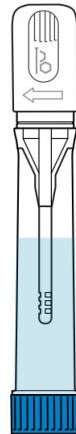


Abb. B  
Dosierstab


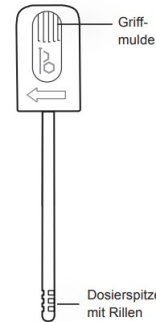


Abb. C  
CALEX® Cap Basisröhrchen

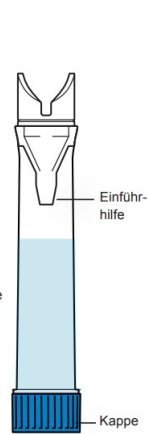


**A.** Tenere il dispositivo CALEX Cap in posizione verticale e rimuovere il tappo di campionamento **bianco** ruotando e tirandolo contemporaneamente verso l'alto.

### Non svitare il cappuccio blu!


**B.** Immergere la punta di dosaggio con le scanalature nelle feci ruotandola e rimuovendola subito dopo. Ripetere la procedura in 3-5 diverse posizioni del campione per riempire completamente le scanalature.

**C.** Il tappo di campionamento deve essere introdotto nuovamente nel corpo del dispositivo CALEX Cap e inserito nella posizione di blocco finale. Si avvertono due scatti.


A

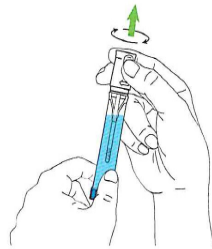

B

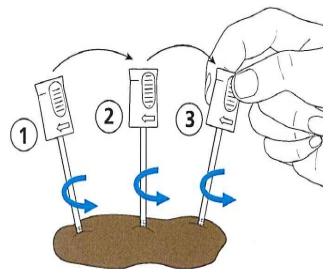

C

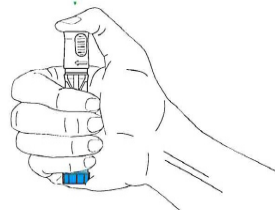

**A.** Halten Sie das CALEX Cap Röhrchen aufrecht und entnehmen Sie den **weißen** Dosierstab, indem Sie ihn gleichzeitig drehen und nach oben ziehen.

### Die blaue Verschlusskappe nicht abschrauben!

**B.** Tauchen Sie die Dosierspitze mit den Rillen in die Stuhlprobe ein, drehen Sie sie darin und entfernen Sie sie gleich danach. Wiederholen Sie diese Schritte an 3 bis 5 verschiedenen Stellen der Stuhlprobe, um die Rillen komplett zu füllen.

**C.** Der Dosierstab wird anschließend über die Einführhilfe in das CALEX Cap Basisröhrchen gesteckt und in die finale Verschlussposition gedrückt. Sie spüren und hören zwei „Klicks“.