

Hinweise zur Probenabnahme

Analyse: Molekulares Screening auf Atemwegsmaterial (Nasenabstrich, Nasen-Rachen-Abstrich, Nasen-Rachen-Aspirat)

Nachgewiesene Parameter (Annahmekodex)

Viren: Influenza A-Virus, Influenza B-Virus, Respiratorisches Synzytial-Virus A/B (1PRESPI); Adenovirus, Enterovirus, Parainfluenza-Virus 1-4, Metapneumovirus (1PRESPI2); Rhinovirus, Coronavirus NL63-229E-OC43, Bocavirus (1PRESPI3);

1PRESPI1 + 1PRESPI2 + 1PRESPI3 = 1PRESPI

Bakterien: *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydomphila pneumoniae*, *Legionella pneumophila*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Bordetella pertussis*, *Bordetella parapertussis* (1PRESPI4)

1PRESPI1 + 1PRESPI2 + 1PRESPI3 + 1PRESPI4 = 1PRESPI

Falls kein spezifischer klinischer Verdacht besteht, wird eine Anforderung der gesamten Panels empfohlen

Abnahmesystem/Probenbehälter

Tupfer eNAT hellblauer Deckel (regular swab)

Tupfer eSwab rosa Deckel



Wo sind Abnahmesystem/Probenbehälter erhältlich?

- **Externe Patienten:** Probenannahmestellen des Südtiroler Sanitätsbetriebes
- Für Abteilungen und Ambulatorien der Krankenhäuser: eNAT via e-mail (coord-labmic.bz@sabes.it) eSwab Cod.5118987
- **Abgabe der Proben nach Abnahme:** in jeder Probenannahmestelle des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Die Öffnungszeiten sind auf der Website <https://www.sabes.it/de/gesundheitsspengel.asp> einsehbar.

Wann: sobald als möglich; falls notwendig können die Proben für maximal 48 Stunden im Kühlschrank gelagert werden (nicht einfrieren!).

- Verpackung mit dem Tupfer und dem Tube öffnen (eNAT oder eSwab).
- Abstrich durchführen.
- Deckel des eNAT o eSwab öffnen und Tupfer hineingeben.
- Tupfer an der farbig gekennzeichneten Bruchstelle abbrechen, dabei den Röhrchenrand als Stütze verwenden.
- Transportgefäß gut verschließen (vollständig zuschrauben).
- Die Provette mit dem Namen des Patienten identifizieren.
- Probe so rasch als möglich für den Weitertransport an das Labor in einer Probenabnahmestelle abgeben.

HINWEIS: Im Falle eines Verdachts auf eine Infektion mit *Bordetella pertussis* bitte einen Nasen-Rachen-Abstrich oder eine Nasen-Rachen-Lavage einsenden (keinen Nasenabstrich) und den klinischen Verdacht auf der Anforderung vermerken.

WICHTIG: für die Durchführung von Kulturen auf Material aus dem Respirationstrakt für andere als die hier angeführten Analysen (z.B. Bakterienkultur), die dafür spezifischen Abnahmesysteme verwenden.

